

GLUTASEPT S

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα 2,5% γλουταραλδεΐδης για υψηλού βαθμού απολύμανση και ψυχρή αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων



Εφαρμογή

Το Glutasept S είναι ένα υψηλού βαθμού απολυμαντικό με βάση τη Γλουταραλδεΐδη και προορίζεται για:

- Απολύμανση επεμβατικών, μη επεμβατικών ιατρικών εργαλείων, οδοντιατρικών εργαλείων καθώς και ιατροτεχνολογικών οργάνων.
- Υψηλού βαθμού ψυχρή αποστείρωση ιατρικών εργαλείων, θερμοευαίσθητων υλικών, εργαλείων αναισθησίας, εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων.

Ιδιότητες

Το Glutasept S είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα νερού με σταθεροποιημένη γλουταραλδεΐδη 2,5%. Είναι ιδιαίτερα δραστικό, γρήγορο και εύκολο στη χρήση. Το οργανικό φορτίο, δεν επηρεάζει την δραστικότητα το έτοιμου διαλύματος. Είναι συμβατό με διάφορα υλικά-μέταλλα (Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ασάλι, χαλκό, ορείχαλκο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και χρωμιωμένο μεταλλικό ορείχαλκο), Συνθετικά υλικά (PVC, polypropylene, polyethylene), λάστιχο και πλαστικό.

Σύνθεση

Δραστικά συστατικά

2,5 g/100 g Glutaraldehyde (CAS 111-30-8)

UFI: DU70-U04M-800J-0377

Εμφάνιση: Διαυγές, διάφανο υγρό

pH: 6,0 – 8,0

Φάσμα δράσης:

Βακτηριοκτόνο - Μυκοβακτηριοκτόνο/Φυματιοκτόνο - Μυκητοκτόνο - Ιοκτόνο και Σποροκτόνο σύμφ. EN14561, EN14562, EN14476, EN14348, EN17126, EN13727

Δραστικότητα	Μέθοδος	Χρόνος Δράσης
Bactericidal	EN 13727:2012+A2:2015	
(<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i>)	EN 14561:2006	5 min
Fungicidal	EN 14562:2006	5 min
(<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)		
Mycobactericidal /Tuberculocidal	EN 14348:2005	15 min
(<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)		
Sporocidal	EN 17126:2018	120 min
(<i>C.difficile</i>)		
Virucidal ,	EN 14476:2013+A1:2015	15 min
(<i>Poliovirus</i> , <i>Adenovirus</i> <i>Norovirus</i>)		

Ταξινόμηση:

Το Glutasept S είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MDR 2017/745 και έχει καταχωρηθεί ως Ιατροτεχνολογικό βοήθημα - Class IIb, Rule 16.

Τρόπος Εφαρμογής

Το Glutasept S είναι ένα σταθερό και έτοιμο προς χρήση διάλυμα. Ενεργοποιητής ή νερό ΔΕΝ θα πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα. Είναι σταθερό και κατάλληλο προς χρήση για τουλάχιστον 28 ημέρες. Η απολύμανση θα πρέπει να γίνεται με την πλήρη εμβάπτιση των προς απολύμανση αντικειμένων στο διάλυμα σύμφωνα με τον κάτωθι συνιστώμενο χρόνο δράσης. Για να επιτύχετε υψηλού βαθμού απολύμανση των ιατρικών εργαλείων και οργάνων, αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη των εργαλείων το δυνατόν περισσότερο και εμβαπτίστε τα στο διάλυμα. Διασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες και τα ανοίγματα των εργαλείων είναι πλήρως καλυπτόμενα από το διάλυμα και αφήστε το να δράσει. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνεται με αποστειρωμένο νερό και στεγνώστε τα εργαλεία. Η μέγιστη διάρκεια χρήσης του διαλύματος εμβάπτισης είναι 28 ημέρες. Μην βασίζεστε αποκλειστικά σε ημέρες χρήσης. Πριν από κάθε χρήση, το διάλυμα πρέπει να ελέγχεται με δοκιμαστικές ταινίες για να αποδειχθεί η ελάχιστη περιεκτικότητα 1,5% σε γλουταραλδεΐδη.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Σε καλά κλεισμένα δοχεία στην κανονική συσκευασία, όχι απευθείας έκθεση στο φως και σε θερμοκρασία 5 ως 35° C.

Συσκευασίες:

Δοχεία των 5 Lt